

ジーラスタ®皮下注 3.6mg ボディーポッドを使用されている方へ

ジーラスタ®皮下注 3.6mg ボディーポッドの使用にあたり、装着後 26~29 時間の間は、機器に以下のイラストのような衝撃・振動を与える、または、直射日光やそれに相当する波長の光が当たると赤ランプが点滅し、機器が止まることがあります。

そのため装着後 26~29 時間の間は、イラストのような行為は避けていただきますようお願いいたします。

なお、赤ランプの点滅は誤作動ではなく、正常に安全機能が作動している結果になります。

赤ランプが点滅した場合は、慌てずに医療機関に連絡をしてください。

<衝撃>

振動が伝わるような
ウォーキング



機器が動作しているかどうか確認するために
コツコツと叩いてしまう



歩行中にカバンなどが
機器に当たってしまう



洗い物中に
シンクに機器をぶつけてしまう



首から下げた携帯電話が
移動中にぶつかってしまう



<光> お腹の機器に
直射日光が当たってしまう

